

Instruktionen zum Thema Ablegen einer FFP Maske

Atemschutzmasken schützen vor wässrigen und öligen Aerosolen, Rauch, Feinstaub, Viren und Bakterien. Dies kann aber nur dann gewährleistet werden, wenn die Maske aufgesetzt, getragen und abgenommen wird.



Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

1 Saubere Handschuhe verwenden

Alternativ auch mit frisch gewaschenen oder desinfizierten Händen.



2 Vorbeugen und Augen schließen

Beim Abnehmen der Maske ist der Oberkörper leicht nach vorn zu beugen und die Augen sind zu schließen.



3 Haltebänder über den Kopf ziehen

Die Haltebänder mit beiden Händen greifen und über den Kopf ziehen.



4 Maske absetzen

Die Maske nach vorn absetzen.



5 Maske entsorgen

Die Maske in einem Mülleimer entsorgen. Wenn die Maske wiederverwendet werden muss, dann ist sie an einem vorbereiteten Ort abzulegen (Nierenschale, Haken, etc.).




6 Handschuhe ausziehen

Die Stulpe des Handschuhs greifen und leicht anheben, ohne dabei die Haut zu berühren. Das Handschuhende so umschlagen, dass die Innenseite der Stulpe außen liegt. Dann den Handschuh abstreifen. Hierbei ebenfalls darauf achten, dass keine Haut berührt wird.

Im zweiten Schritt mit der sauberen Hand von innen in den anderen Handschuh greifen und anschließend von der Hand streifen.

Die Handschuhe sind anschließend zu entsorgen und die Hände zu reinigen.

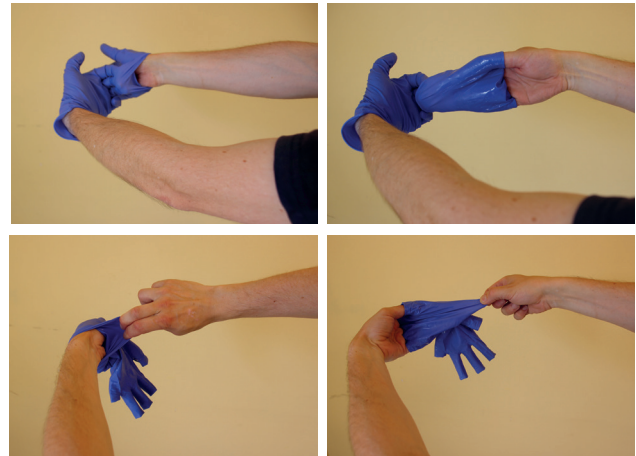

Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge
Korbbrille	1 EA
Schutzhandschuhe	1 EA

Spezialwerkzeug	Menge

Sonderausstattung	Menge